

Als er een informatiecode wordt weergegeven

Informatiecodes die tijdens het gebruik van de Alere Afinion™ AS100 Analyzer worden weergegeven, verwijzen naar specifieke informatie- of foutmeldingen. De codenummers, mogelijke oorzaken en te ondernemen acties worden hieronder vermeld.

Als de analyzer tijdens het verwerken van een testcartridge een probleem detecteert, wordt de test automatisch afgebroken en wordt de testcartridge veilig verplaatst naar de cartridgekamer. Ga als volgt te werk:

- 1



Noteer het codenummer en druk op  om te accepteren.
Het deksel wordt automatisch geopend.
- 2



Verwijder de testcartridge.
Als de testcartridge niet wordt uitgeworpen, start de analyzer opnieuw.
Gebruik de testcartridge niet opnieuw.
- 3



Zoek de mogelijke oorzaak in onderstaande tabel op, en onderneem actie om het probleem op te lossen.
Neem contact op met uw Alere Afinion™ dealer (zie 'Service-informatie', blz. 29).

 Gebruik een testcartridge die door de analyzer is afgewezen niet opnieuw. Verzamel een nieuw monster en herhaal de test met een nieuwe testcartridge.

Informatieberichten die veroorzaakt worden door testspecifieke beperkingen

[#]	Oorzaak	Te ondernemen actie
101	Hematocriet te laag	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™ CRP of Lipid Panel pakket.
102	Hematocriet te hoog	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™ CRP of Lipid Panel pakket.
103	Hemoglobine te laag	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™ HbA1c-pakket.
104	Hemoglobine te hoog	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™ HbA1c-pakket.
105	HbA1c te laag	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™ HbA1c-pakket.
106	HbA1c te hoog	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™ HbA1c-pakket.
107	Creatine te hoog	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™ ACR-pakket.
108	Bloed in urine	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™ ACR-pakket.

Informatieberichten die veroorzaakt worden door monster of testcartridge

[#]	Oorzaak	Te ondernemen actie
201	Onvoldoende monstervolume: - Leeg capillair - Luchtbel in capillair - Capillair niet voldoende gevuld	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. Controleer of het capillair volledig gevuld is zonder luchtbelletjes (zie bijsluiters voor de gebruikte Alere Afinion™ test). Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw lokale Alere Afinion™-leverancier.
202	Te veel monstermateriaal op de buitenkant van het monster-apparaat	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. Zorg dat alleen het topje van het capillair contact maakt met het monster (zie pakketbijlage voor de gebruikte Alere Afinion™-test)
203	Verkeerd monstermateriaal	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. Controleer of het juiste monstermateriaal gebruikt is (zie pakketbijlage voor de gebruikte Alere Afinion™ test).
204	Cruor monster	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. De tijd vanaf het vullen van het capillair tot het analyseren van de testcartridge dient zo kort mogelijk te zijn.
	Gehemolyseerd bloedmonster of monster van slechte kwaliteit	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™-pakket. Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.
	Fout testcartridge of analyzer	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. Als het probleem zich blijft voordoen, herstart de analyzer en voer controles uit.
205	Capillair gebarsen of beschadigd	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. Controleer het monsterapparaat voor gebruik en verwerk het voorzichtig.
206	Streepjescode niet leesbaar (vuil of beschadigd)	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw lokale Alere Afinion™-leverancier.
207	- Geen monsterapparaat geplaatst - Gebruikt monsterapparaat is van andere Alere Afinion™-test - Label op monsterapparaat niet leesbaar (vuil of beschadigd)	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. Controleer of het juiste monsterapparaat gebruikt is en of het label schoon is.
208	Testcartridge al gebruikt	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.
209	Vervaldatum van testcartridge verstrekken	Controleer de vervaldatum op het folie of het doosje. Herhaal de test met een nieuw monster en een testcartridge uit een andere partij.
	De datum op de analyzer is incorrect ingesteld	Controleer of de datum op de analyzer correct is ingesteld. Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.
210	Temperatuur van de testcartridge is te laag	Herhaal de test met een nieuw monster en nieuwe testcartridge. Controleer of de bedrijfstemperatuur binnen het aanbevolen bereik ligt (zie pakketbijlage bij gebruikte Alere Afinion™-test).
211	Temperatuur van de testcartridge is te hoog	Herhaal de test met een nieuw monster en nieuwe testcartridge. Controleer of de bedrijfstemperatuur binnen het aanbevolen bereik ligt (zie pakketbijlage bij gebruikte Alere Afinion™-test).
212	Testcartridge niet herkend door de analyzer	De vereiste softwareversie voor deze test is niet geïnstalleerd. Neem contact op met uw lokale Alere Afinion™-leverancier voor hulp.
213	Fout testcartridge of analyzer	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.
214		Als het probleem zich blijft voordoen, herstart de analyzer en voer controles uit.
215	Fout testcartridge of analyzer	Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge. Als het probleem zich blijft voordoen, herstart de analyzer en voer controles uit.
	Gehemolyseerd bloedmonster of monster van slechte kwaliteit (Alere Afinion™ HbA1c)	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™ HbA1c-pakket. Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.
217	Gehemolyseerd bloedmonster of monster van slechte kwaliteit (Alere Afinion™ HbA1c)	Lees de bijlage bij het Alere Afinion™ HbA1c-pakket. Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.
218	Condensatie gedetecteerd op cartridge	Gebruik een nieuwe testcartridge, zorg ervoor dat de cartridge op kamertemperatuur gekomen is, voordat de foliezak wordt geopend.

Informatieberichten en berichten die veroorzaakt worden door fout analyzer

[#]	Oorzaak	Te ondernemen actie
27 28 29	Opstartprocedure mislukt	Neem contact op met uw lokale leverancier voor hulp.
Zelftest fout analyzer in buiten-bedrijfsmodus	Fout analyzer	Herstart analyzer. Als het probleem blijft bestaan, neemt u dan contact op met uw lokale Alere Afinion™-leverancier.

[#]	Oorzaak	Te ondernemen actie
301	Zelftest mislukt	De analyzer opnieuw starten.
302	Fout analyzer	Herstart de analyzer en voer controles uit. Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.
303	Temperatuur analyzer is te hoog	Controleer of de bedrijfstemperatuur binnen het aanbevolen bereik valt (15-32°C). Wacht tot de analyzer is afgekoeld. Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.
304	Temperatuur analyzer is te laag	Zorg ervoor dat de bedrijfstemperatuur binnen het aanbevolen bereik is voor de gebruikte Alere Afinion™-test (zie bijsluiter). De temperatuur van de analyzer wordt weergegeven in het opstartmenu (zie pagina 13). Herhaal de test met een nieuw monster en testcartridge.
305	- Printer onjuist aangesloten - Fout van de printer	Schakel de analyzer uit, sluit de printer opnieuw aan en herstart de analyzer. Als de melding opnieuw wordt weergegeven, zie dan de gebruikershandleiding van de printer.
Fout druk-scherm	Fout drukscherm / Touch screen-knoppen reageren niet goed	Herstart instrument en lijk het scherm opnieuw uit. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw lokale Alere Afinion™-distributeur.

Overige informatiecodes

[#]	Oorzaak	Te ondernemen actie
401	Geen geregistreerde supervisors op operatorlijst	Er is ten minste één supervisor vereist in de operatorlijst als het instrument geconfigureerd is als Operator-ID met verificatie. Zie pagina 14.
402	Kan laatste supervisor niet verwijderen	Er is ten minste één supervisor vereist in de operatorlijst als het instrument geconfigureerd is als Operator-ID met verificatie. Zie pagina 14.
403	Dit onderzoektype is niet toegankelijk voor de operator	De ingelogde operator heeft geen toegang om dit onderzoektype uit te voeren. Neem contact op met uw supervisor.
404	Operator-ID kan niet gevonden worden in de operatorlijst	Wanneer een Operator-ID vereist is in de configuratie, moet de opgegeven Operator-ID aanwezig zijn op de lijst met operators. Neem contact op met uw supervisor.

[#]	Oorzaak	Te ondernemen actie
501	De controlepartij heeft de uiterste gebruiksdatum overschreden.	Controleer de uiterste gebruiksdatum op de (bijsluiter van de) verpakking van de controlepartij. Herhaal de test met een monster voor een nieuwe controlepartij.
502	De Alere Afinion™ Control Data wordt niet herkend en is niet in de controlepartij-database opgeslagen	Voer de Alere Afinion™ Control Data opnieuw in. Zie pagina 17.
503	Controleverificatie afgebroken.	De ingevoerde Alere Afinion™ Control Data wordt niet herkend. De controletest is afgebroken door de operator. Testresultaat is niet opgeslagen. Voer een nieuwe controletest uit om de KC-blokkeerinterval te resetten.
504	De vereiste controletest-interval is verlopen. Voor dit onderzoek is een patiënttest uitgeschakeld.	Een geslaagde controle-run moet worden uitgevoerd volgens de configuratie, om de interval te resetten of dit onderzoek te deblokken voor patiënttesten.

[#]	Oorzaak	Te ondernemen actie
601	De lijst met operators of controlepartij-database is vol	In de operatorlijst kunnen 500 operators opgeslagen worden en de controlepartij-database kan 100 controlepartijen bevatten. Verwijder een operator of controlepartij om een nieuw item te kunnen toevoegen.